

Instrucciones para la recogida de la muestra de saliva

El colegio te proporcionará el siguiente **material**:

- Un **tubo grande** para la recogida de la muestra
- Una **pipeta** para traspasar la muestra del tubo grande al pequeño
- Un **microtubo** que será el que tendrás que entregar en el punto de recogida
- Una **toallita** para limpiar el microtubo

Pasos a seguir para la correcta recogida de la muestra de saliva


1. La recogida de saliva se debe hacer **la mañana del día que se tiene que entregar la muestra, antes de desayunar**.
2. **Salivar** durante unos segundos, acumular saliva en la boca y recoger la misma dentro del tubo de plástico grande (**sin escupir**).
Repetir diversos ciclos (hasta llenar el fondo cónico del tubo).



Salivar sin escupir dentro del tubo grande



Llenar el fondo cónico del tubo

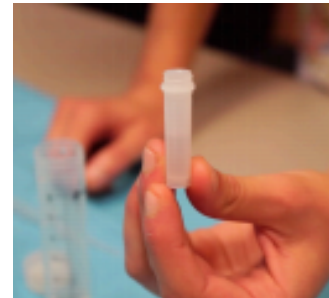

No llenar más de la mitad del microtubo.

3. **Traspasar** la saliva con la pipeta de plástico en el microtubo y cerrarlo correctamente. No llenar más de la mitad del microtubo.
4. **Limpiar** la superficie externa del microtubo con la toallita que encontrarás dentro del kit.
5. **Entregar** el microtubo en el punto de recogida habilitado en el Casal Can Fàbregas (C/Pere Figuera i Serra, 1) de Sarrià a l' hora indicada per part de l' escola.

Para más información, consulta el video explicativo que encontrarás al escanear el código QR

